



ProFix

**HSO**<sup>®</sup>  
HOSPITAL SUPPLY ORGANISATION



MULTIFUNKTIONALE  
FIXATIONSSCHIENE

**SICHER  
UND  
ENT-  
SPANNT**



## ProFix FIXATIONSSCHIENE

### Entlastung des Handgelenks dank multifunktionaler Fixationsschiene

Dauerhafte Zugänge und Infusionen können bei Patienten rasch zu schmerzhaften Verspannungen der Handgelenke führen. ProFix ermöglicht eine **schmerzfremie Ruhigstellung des Handgelenks bei arteriellen Zugängen oder peripheren Infusionen** und stellt dadurch eine wirkungsvolle Entlastung dar.

Eine mit hautfreundlichem Schaumstoff weich gepolsterte Handschiene trägt zusätzlich zum Komfort des Patienten bei. Neben der ProFix Standard-Schiene wurde für besonders aktive bzw. kräftigere Patienten zusätzlich die ProFix Extra-Schiene mit einem verstärkten Aluminiumkern entwickelt.

#### Bestelloptionen

Produkt	Versandeinheit	Bestell-Nr.
Standard - einteilig, blau 22 cm lang   9 cm breit	25 Stück	HSOPF22
Extra - einteilig, blau 22 cm lang   9 cm breit	25 Stück	HSOPF22H

## ANWENDUNGSSCHRITTE



1

### Platzierung & Positionierung der Schiene

TIPP

Platzieren Sie die Schiene je nach Indikation an der Innen- oder Außenseite des Armes. Biegen Sie die Schiene ggf. vorab in die gewünschte Position.



2

### Platzierung der Bänder

TIPP

Führen Sie die elastischen Bänder um den Arm.



3


### Platzierung & Positionierung der Schiene

TIPP

Schließen Sie die Bänder mit den Klettverschlüssen. Um eine optimale Durchblutung zu gewährleisten, dürfen die Bänder nicht zu straff sitzen.

[www.hso-solutions.at](http://www.hso-solutions.at)

Richten Sie Ihre Fragen gerne direkt  
an Ihren persönlichen Produktspezialisten:

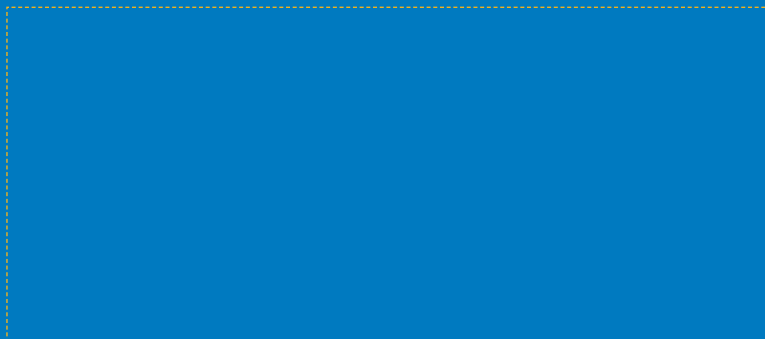

**VERTRIEB**

Rudolf Heintel Medizintechnik GmbH  
Erdbergstraße 166  
1030 Wien, Österreich

T +43 (1) 403 89 56-0  
F +43 (1) 403 89 56-50  
[medizintechnik@heintel.at](mailto:medizintechnik@heintel.at)  
[www.heintel.at](http://www.heintel.at)



**HERSTELLER**

MSP Medizintechnik GmbH  
Würtzlerstraße 16  
1030 Wien, Österreich

T +43 (1) 403 89 56-0  
F +43 (1) 403 89 56-50  
[info@hso-solutions.at](mailto:info@hso-solutions.at)  
[www.hso-solutions.at](http://www.hso-solutions.at)  
[www.thoraxsafe.com](http://www.thoraxsafe.com)

Foto:  
© IStock Photo MikkoMiettinen  
© IStock Photo Anton Novik

Druck- & Satzfehler vorbehalten  
Version 1.0 | Stand: Sep 2017